



## INSTRUKSI PENGGUNAAN

Anda harus mengikuti petunjuk pengujian dengan cermat untuk mendapatkan hasil akurat.

Jangan makan atau minum setidaknya 15 menit atau menggunakan produk pembersih mulut 30 menit sebelum Anda memulai pengujian.

**PERINGATAN:** Jika sedang menjalani perawatan HIV (ARV), Anda mungkin akan mendapatkan hasil yang tidak tepat.



[www.oraquickhivselftest.com](http://www.oraquickhivselftest.com)

INDONESIAN

# ORAQUICK®

UJI MANDIRI HIV

## CARA MENGGUNAKAN KIT UJI MANDIRI HIV ORAQUICK®



**SIAPKAN ALAT UNTUK MENGHITUNG WAKTU PENGUJIAN**



Isi kantong: **kit uji**, **penyangga uji**, dan **instruksi penggunaan**.



Kit uji Anda berisi dua kantong.



Sobek kantong untuk mengeluarkan **tabung**.



Lepaskan tutupnya.




**JANGAN** tuangkan cairan. **JANGAN** minum cairan.



Pasang tabung pada **penyangga**.




Sobek kantong yang berisi **alat uji** dan keluarkan. **JANGAN** sentuh bantalan pipih dengan jari Anda. **JANGAN** makan atau telan pengawet.

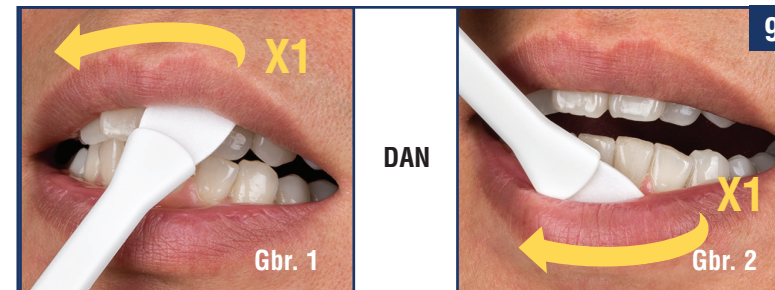

Tekan **Bantalan Pipih** dengan kuat pada gusi Anda dan sapukan di sepanjang **gusi atas satu kali** (gbr. 1) dan **gusi bawah satu kali** (gbr. 2).




Masukkan **bantalan pipih** ke dalam tabung sampai menyentuh dasarnya.

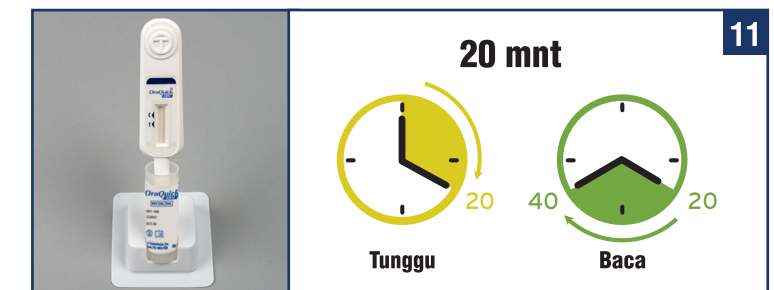

**BIARKAN BANTALAN DI SANA selama 20 MENIT** sebelum membaca hasil. **JANGAN** membaca hasil uji setelah 40 menit.

## MEMAHAMI HASIL Baca hasil uji di tempat yang cukup terang

### HASIL POSITIF HIV

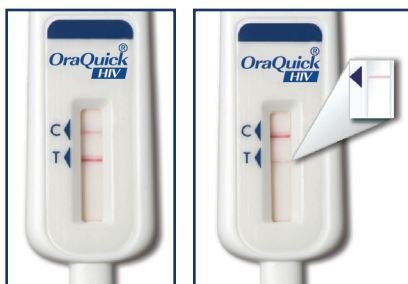

Dua garis penuh, bahkan jika garis tersebut samar, berarti Anda mungkin POSITIF HIV dan perlu melakukan pengujian lebih lanjut.



*Sesegera mungkin . . .*

**Kunjungi Pusat Pengujian HIV atau Fasilitas Kesehatan terdekat Anda**

### HASIL TIDAK VALID



Tidak ada garis di samping "C" (bahkan jika terdapat garis di samping "T"), atau latar belakang yang berwarna merah menjadikan hasil uji sulit dibaca. Ini berarti pengujian tidak berhasil dan harus diulangi. **Anda perlu kembali melakukan pengujian.**



Pengujian tidak bekerja dengan semestinya. Kunjungi Pusat Pengujian HIV atau Fasilitas Kesehatan terdekat untuk kembali melakukan pengujian.

### HASIL NEGATIF HIV

#### JIKA DIBACA SEBELUM 20 MENIT, HASIL UJI MUNGKIN TIDAK TEPAT



SATU GARIS di samping "C" dan TIDAK ADA garis di samping "T", berarti Anda NEGATIF HIV.

Lakukan pengujian rutin. Jika Anda mungkin terpapar HIV, lakukan pengujian lagi dalam waktu 3 bulan.

### TIDAK YAKIN DENGAN HASIL

Anda tidak mengetahui hasil uji atau tidak yakin dengan hasil Anda.

Kunjungi Pusat Pengujian HIV atau Fasilitas Kesehatan terdekat untuk kembali melakukan pengujian.

### BUANG

Buang batang uji, pasang tutup pada tabung uji, dan buang semua isi kantong ke tempat sampah biasa.



**HANYA UNTUK KEPERLUAN PEMERIKSAAN • TIDAK UNTUK PERAWATAN PASIEN**

